



DE Venen Massagegerät
Gebrauchsanweisung 2



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.


Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	2	8. Reinigung und Aufbewahrung	12
2. Zeichenerklärung	3	9. Was tun bei Problemen?	12
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	10. Entsorgung	13
4. Warn- und Sicherheitshinweise	6	11. Technische Daten	14
5. Gerätebeschreibung	9	12. Netzteil	14
6. Inbetriebnahme	9	13. Garantie / Service	15
7. Anwendung	10		

1. LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Venen Massagegerät und seine einzelnen Bestandteile keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Service-Hotline.

- 1 x Beinmanschette rechts [1.]
- 1 x Beinmanschette links [2.]
- 2 x Luftschläuche [3.]
- 1 x Handschalter [4.]
- 1 x Aufbewahrungstasche [5.]
- 4 x AA Batterien (1,5 V) [6.]
- 1 x Netzteil [7.]
- 1 x Diese Gebrauchsanweisung

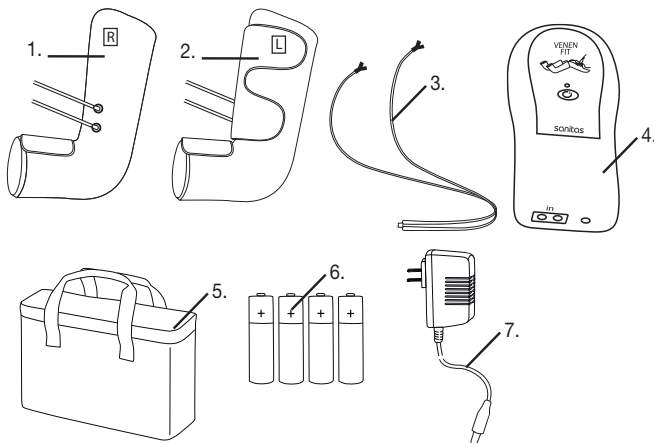

2. ZEICHENERKLÄRUNG

Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Gerät verwendet:

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.		Zulässige Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit
	ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/ den Bestandteilen		Schaltnetzteil
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen		Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer
	Anleitung beachten Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen		IP-Klasse Gerät geschützt gegen Fremdkörper $\geq 12,5$ mm und gegen schräges Tropfwasser
	Anleitung beachten Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen		Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
	Hersteller		Polarität des Gleichstromnetzsteckers
	Gerät der Schutzklasse II Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2		Chargenbezeichnung
	Isolierung der Anwendungsteile Typ BF Galvanisch isoliertes Anwendungsteil (F steht für floating), erfüllt die Anforderungen an Ableitströme für den Typ B		Niederfrequente elektromagnetische Strahlung
	Operating Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit		Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet
	Storage Zulässige Lagerungstemperatur und -luftfeuchtigkeit		Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Sicherheitstransformator, kurzschlussfest		Medizinprodukt
	Energie Effizienz Level 6		Unique Device Identifier (UDI) Kennung zur eindeutigen Produktidentifikation
	Artikelnummer		Typennummer

	Seriennummer		Herstellungsdatum
	Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen	ta= 45°C	Nenn-Umgebungstemperatur Maximale Betriebstemperatur
	Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn der Stecker beschädigt ist.		

Hinweis

Das Venen Massagegerät ist nach Reinigung der Beinmanschetten für den Wiedereinsatz geeignet.

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Zweckbestimmung:

Das Venen Massagegerät ist mit auf- und abblasbaren Luftkissen und stufenlos einstellbarer Intensität zur Luftdruckmassage der Beine geeignet.

Zielgruppe:

Das Venen Massagegerät ist für Personen ab 14 Jahren geeignet, die einen Unterschenkelumfang von 29 - 53 cm aufweisen. Das Gerät ist nur für den häuslichen/privaten Gebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen Gebrauch.

Klinischer Nutzen:

Das Venen Massagegerät ist für die Vorbeugung von geschwollenen Beinen, Lymphödemen, Sportverletzungen (wie Prellungen, Hämatomen und Verstauchungen). Außerdem beugt das Gerät die Entstehung von Krampfadern und Besenreisern vor.

Indikation:

- Lymphödemen
- Schwellungen in den Beinen
- Krampfadern und Besenreisern
- Sportverletzungen (Prellungen, Hämatome, Verstauchungen)
- Muskelverspannungen

Unerwünschte Nebenwirkungen:

- Längerer Gebrauch kann Taubheit in den Beinen verursachen
- Kompression eines bestehenden epifaszialen arteriellen Bypasses

Kontraindikation:

WARNUNG

Verwenden Sie das Venen Massagegerät **nicht**

- bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich der Füße und Beine, dies gilt für äußere hautbezogene Erkrankungen und Verletzungen und für innere Verletzungen des Bein- / Fußbereichs (z.B. des Muskel-, oder Sehnenapparates sowie knöchernen Skeletts und der Gelenksysteme).

- während der ersten beiden Trimenen der Schwangerschaft nur nach ärztlicher Erlaubnis, im letzten Trimenon der Schwangerschaft keine Anwendung.
- bei vorliegenden, jedoch nicht ärztlich abgeklärten Erkrankungssymptomen.
- bei akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankungen.
- bei laufenden medizinischen Eingriffen oder Therapien, wie z.B. eine laufende Hämodilution.
- nach Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z.B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol, Psychopharmaka, Antiallergika).
- bei Kindern unter 14 Jahren.
- bei akuten Erkrankungen des Herzens und / oder des Gefäßsystems.
- bei dem Vorliegen arterieller Gefäßerweiterungen (z. B. infra- oder suprarenale Aneurysmen).
- bei dem Vorliegen venöser Gefäßerweiterungen ist eine Anwendung nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich.
- bei dem Vorliegen arterieller und oder venöser Entzündungserkrankungen, gleich ob infektiöser oder immunologischer Ursache.
- bei dem Vorliegen einer venösen Insuffizienz der Beingefäße an den Unter- und / oder Oberschenkeln des Anwenders.
- bei vorangegangenen Beinvenenthrombosen mit oder ohne embolischer Komplikation der Lungengefäße.
- bei Patienten unter einer laufenden Heparin-, direkter oraler Antikoagulan- oder einer Cumarin-Therapie.
- bei einem Verdacht oder bestätigten Kompartmentsyndrom an Unterschenkel oder Fuß.
- wenn Sie unter Sensibilitätsstörungen der Haut leiden oder eine erniedrigte Druckempfindlichkeit besitzen.
- Diabetiker wenden das Gerät nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt an.
- bei chronischen Hautulcerationen, gleich ob im Rahmen eines vorliegenden Diabetes oder nicht.
- bei dem Vorliegen einer arteriellen Verschlusskrankung, unabhängig von der Lage der diagnostizierten Gefäßverengungen.

WARNUNG

Konsultieren Sie Ihren behandelnden Arzt zur Unbedenklichkeit der SFM 90 Anwendung bei allen vorliegenden akuten oder Grunderkrankungen, und insbesondere in den folgenden Fällen:

- wenn ein operativer Eingriff an den Beinen oder Füßen vorliegt und die Heilung aus ärztlicher Sicht nicht als abgeschlossen gilt.
- bei akuten oder chronischen Hauterkrankungen des Bein- und Fußbereichs.
- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.
- bei Vorliegen eines Diabetes mellitus.
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache.
- bei akuten Entzündungen und / oder Erkrankungen.
- bei Herzleistungsstörungen, insbesondere bei Wassereinlagerung in den Beinen.
- bei Lungenödemen.
- bei Bluthochdruck.
- beim Verdacht auf oder dem diagnostizierten Vorliegen bösartiger Tumoren.
- bei Lymphzirkulationsstörungen im Bein- und / oder Fußbereich.
- bei empfindlicher Haut.
- bei allen bekannten Herzerkrankungen.
- bei allen bekannten Störungen oder Erkrankungen der Hirndurchblutung.
- bei allen bekannten Nierenerkrankungen.
- bei vorliegendem oder Verdacht auf einen Flüssigkeitserguss im Bauchraum (Aszites).

4. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen.



Hinweis

- Biokompatibilität: Keines der Materialien, mit denen der Patient oder Anwender in Kontakt kommt, stellt ein unangemessenes Risiko dar. Unsere Produkte enthalten nur Materialien, die nach strengen Vorschriften getestet wurden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Legen Sie den Handschalter während der Benutzung neben Ihren Körper.



WARNUNG

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kontaktieren Sie in diesen Fällen den Kundendienst.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Baden oder während des Schlafes.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß den spezifischen zulässigen Betriebs- und Aufbewahrungsbedingungen.
- Das Gerät kann keine ärztliche Behandlung ersetzen.



WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nur an den Beinen und Füßen.
- Verwenden Sie den Venen Trainer nicht bei Tieren.
- Verwenden Sie den Venen Trainer nicht bei Aktivitäten, bei denen eine unerwartete Reaktion gefährlich sein kann.
- Verwenden Sie den Venen Trainer nicht länger als 30 Minuten (Überhitzungsgefahr) und lassen Sie den Venen Trainer mindestens 20 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit Hochfrequenzgeräten verwendet werden, um Verbrennungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Gehen Sie nicht und bewegen Sie sich nicht, während Sie dieses Gerät benutzen, da dies für den Patienten unangenehm sein kann. Außerdem könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig, damit es nicht herunterfällt und Sie verletzt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Baden oder Schlafen.
- Wenn das Gerät beim Anwender Beschwerden verursacht, stellen Sie die Anwendung sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit anderen medizinischen elektrischen Geräten, z. B. Herzschrittmachern, künstlichen Herzschrittmacher, künstliche Herz-Lungen-Maschinen, Elektrokardiographen oder andere lebenserhaltende Geräte.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerät nicht, um Fehlfunktionen oder Stromschläge zu vermeiden.
- Für Notfälle sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zur Seite geschoben werden kann.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen es hohen Temperaturen, Entflammbarkeit, elektromagnetischer Strahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Wenn der Kunde dieses Gerät zusammen mit Hochfrequenz-Chirurgiegeräten verwendet, kann es zu Schäden am Gerät kommen. Wenn das Gerät in der Nähe (1 m) von Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegeräten verwendet wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht zuverlässig.
- Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät ohne Genehmigung des Herstellers vor.

Handhabung:



WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass die Luftschläuche nicht geknickt werden.
- Setzen oder stellen Sie sich niemals mit Ihrem ganzen Gewicht auf die Beinmanschetten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Beinmanschetten oder den Handschalter.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Längerer Gebrauch kann zu Taubheitsgefühlen in den Beinen und Überhitzung des Geräts führen. In diesem Fall unterbrechen Sie die laufende Anwendung.
- Vermeiden Sie es, den Klettverschluss der Beinmanschetten während der Anwendung zu öffnen, da dies die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen könnte. Öffnen Sie den Klettverschluss der Beinmanschetten nur, wenn der Druck auf Ihre Beine unangenehm wird. Das Gerät hat keine STOP Taste.
- Achten Sie darauf, dass die Beinmanschetten während der Anwendung nicht durch Decken oder andere Gegenstände verdeckt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich beim Anlegen der Kleidung keine Falten unter der Manschette bilden und dass sich keine Gegenstände wie Gürtelschnallen, Knöpfe oder Taschen mit Inhalt unter den Manschetten befinden.



WARNUNG

Wie jedes elektrische Gerät ist auch das Venen Massagegerät vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.

Betreiben Sie das Venen Massagegerät deshalb

- nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der auf dem Typschild angegebenen Netzspannung,
- nie, wenn das Venen Massagegerät oder seine einzelnen Bestandteile sichtbare Schäden aufweist,
- nicht während eines Gewitters.

Schalten Sie das Venen Massagegerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das Venen Massagegerät vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät, um das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am

Stromkabel. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Kabel nicht einklemmen, knicken oder drehen. Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände hineinstecken. Öffnen Sie unter keinen Umständen den Handschalter.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät, der Handschalter und das Stromkabel nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Benutzen Sie das Gerät deshalb nur in trockenen Innenräumen (z.B. NIE in der Badewanne, Sauna).

Greifen Sie keinesfalls nach einem Venen Massagegerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Venen Massagegerät oder das seine einzelnen Bestandteile sichtbare Schäden aufweisen. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.



WARNUNG: Reparatur

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.



WARNUNG: Brandgefahr

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr!

Betreiben Sie das Gerät deshalb

- nie unter einer Abdeckung, wie z. B. Decke, Kissen, ...
- nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.




WARNUNG: Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus der Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts, Batterien aus Batteriefach nehmen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

5. GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Stromanschluss
2. Lufteinlass („in“)
3. Luftauslass („out“)
4. EIN/AUS-Taste
5. Kontrollleuchte
6. Luftschläuche
7. Anschluss für Luftschläuche

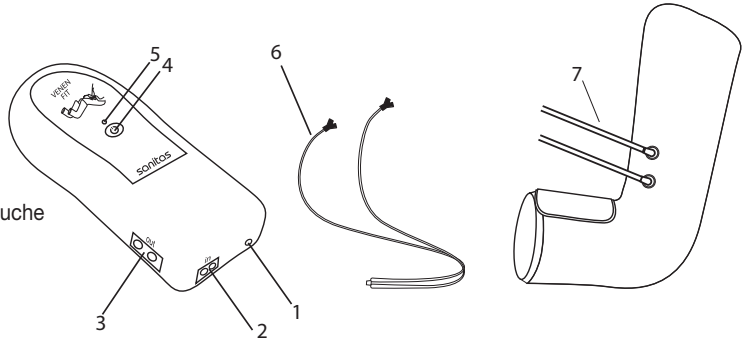

6. INBETRIEBNAHME

Sie können das Venen Massagegerät wahlweise mit Batterien (4 x Typ 1,5V AA Alkaline Type LR06) oder mit dem demgelieferten Netzteil betreiben.

6.1 Inbetriebnahme mit Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Handschalters.
2. Legen Sie vier Batterien vom Typ 1,5V AA (Alkaline Type LR06) ein. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Batterien entsprechend der Kennzeichnung mit korrekter Polung eingelegt werden. Beachten Sie die Grafik im Batteriefach. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.
3. Schließen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Handschalters, bis es hör- und spürbar fest einrastet.


6.2 Inbetriebnahme mit Netzteil



Hinweis




Bevor Sie mit der Inbetriebnahme mit dem Netzteil beginnen, achten Sie darauf, dass sich keine Batterien im Handschalter befinden.

1. Schließen Sie das Netzteil wie abgebildet an den Handschalter an.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzteil in eine geeignete Steckdose.
3. Das Venen Massagegerät ist nun einsatzbereit.

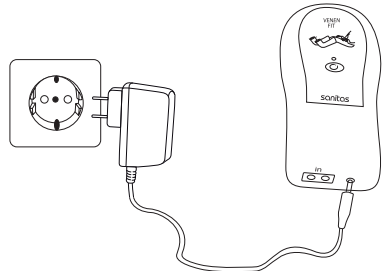


7. ANWENDUNG

7.1 Anwendung beginnen

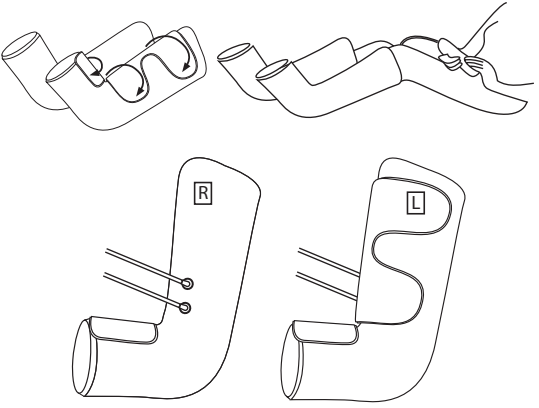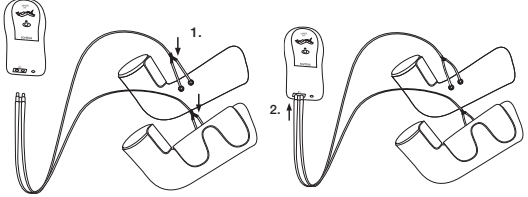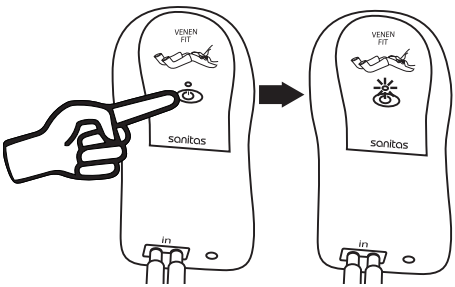1. Befolgen Sie die Anweisungen aus dem Kapitel „Inbetriebnahme“.			
2. Legen Sie die Beinmanschetten nacheinander wie abgebildet eng am nackten Bein oder an eng anliegenden Kleidungsstücken (z.B. Strumpfhosen) am Unterschenkel und Fuß an. Die Beinmanschetten sollten so stramm angelegt sein, dass noch zwei Finger unter die Beinmanschetten passen. Sollten sich die Beinmanschetten zu eng anfühlen, legen Sie die Beinmanschetten so an, dass noch eine flache Hand unter die Beinmanschetten passt. 3. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie die Beine während der Anwendung waagrecht oder leicht erhöht, damit das Blut besser zirkulieren kann. - Die Beinmanschette für das linke Bein ist auf der Innenseite mit einem „L“ markiert. - Die Beinmanschette für das rechte Bein ist auf der Innenseite mit einem „R“ markiert.			
4. Verbinden Sie den Luftschlauch mit den Beinmanschetten (1.). Achten Sie darauf, dass die Luftschläuche fest sitzen und nicht abrutschen können. Verbinden Sie das andere Ende des Luftschlauchs mit dem Lufteinlass („in“) am Handschalter (2.).			
5. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Venen Massagegerät einzuschalten. Sobald das Venen Massagegerät eingeschaltet ist beginnt die Kontrollleuchte am Handschalter zu leuchten. Anwendung <table border="1" data-bbox="72 1141 481 1209"> <tr> <td>Empfohlene Anwendungszeit</td> <td>2x tägl. je 10-20 min.</td> </tr> </table> ⚠️ ACHTUNG Bei längeren Anwendungen kann es zu Taubheitsgefühlen in den Beinen kommen und zu Überhitzungen des Geräts führen. Brechen Sie dann die laufende Anwendung ab.	Empfohlene Anwendungszeit	2x tägl. je 10-20 min.	
Empfohlene Anwendungszeit	2x tägl. je 10-20 min.		

6. Stellen Sie mit dem Luftdruck-Regler Ihre gewünschte Intensität ein. Starten Sie zunächst auf der niedrigsten Stufe, um sich langsam an die Massage zu gewöhnen. Für einen optimalen Effekt sollte die eingestellte Intensität zwar stark, aber noch als angenehm empfunden werden.

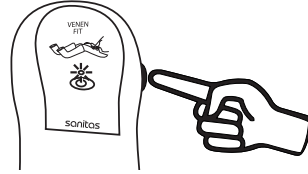

i Hinweis

Das Venen Massagegerät beginnt nun nacheinander und abwechselnd die Beine zu massieren. Die Beine werden nie gleichzeitig massiert. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.

Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik, die auf eine maximale Betriebsdauer von 30 Minuten eingestellt ist.

7.2 Anwendung beenden

Um die Anwendung zu beenden, muss zunächst das Venen Massagegerät ausgeschaltet und anschließend die Luft aus den Beinmanschetten heraus gelassen werden.


Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Venen Massagegerät aus, indem sie die EIN/AUS-Taste am Handschalter drücken. Die Kontrollleuchte am Handschalter erlischt.




2. Ziehen Sie den Luftschlauch aus dem Handschalter.


3. Stecken Sie den Luftschlauch in den seitlichen Luftauslass („out“) des Handschalters.

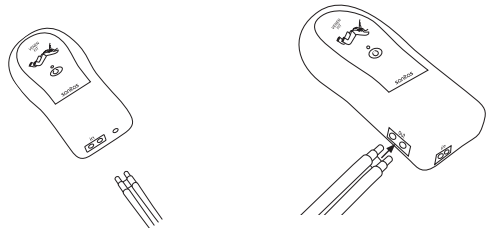

4. Drehen Sie den Schieberegler am Handschalter auf „max“ und drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste am Handschalter. Die Kontrollleuchte am Handschalter beginnt zu leuchten und die Luft aus den Beinmanschetten wird abgepumpt.

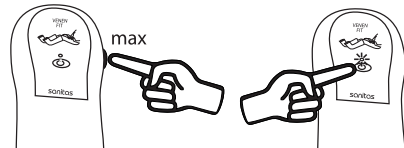

5. Sobald die Luft komplett abgepumpt wurde, drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste. Die Kontrollleuchte erlischt. Öffnen Sie nun die Klettverschlüsse (1.) und nehmen Sie die Beinmanschetten ab. Ziehen Sie die Luftschläuche am „Y-Verbindungsstück“ aus den Beinmanschetten (2.), sodass die kurzen Schlauchendstücke wie abgebildet an den Beinmanschetten eingesteckt bleiben (3.). Wenn Sie das Venen Massagegerät über das Netzteil betrieben haben, ziehen Sie es aus der Steckdose und dem Handschalter heraus.

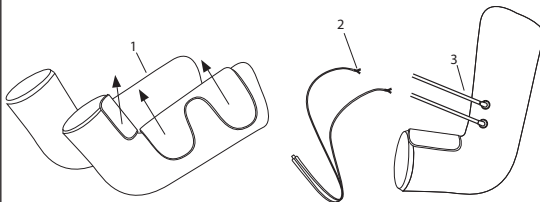

8. REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

8.1 Reinigung der Beinmanschetten

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus und entfernen Sie die Luftschläuche (außer die kurzen Schlauchendstücke) aus den Beinmanschetten und dem Handschalter.
- Reinigen Sie die Beinmanschetten und die einzelnen Bestandteile mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Benutzen Sie zum Reinigen keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass beim Reinigen der Bestandteile kein Wasser eindringt.
- Verwenden Sie die Beinmanschetten sowie weitere Bestandteile erst wieder, wenn Sie vollständig getrocknet sind.

8.2 Aufbewahrung

- Wenn Sie das Venen Massagegerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Handgerät. Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen.
- Knicken Sie die Luftschläuche und die Beinmanschetten nicht scharf ab.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, belüfteten Ort in der Originalverpackung.

9. WAS TUN BEI PROBLEMEN?

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Beinmanschetten werden nicht aufgepumpt	Batterien sind leer	Tauschen Sie die Batterien im Handschalter aus.
	Netzteil nicht eingesteckt	Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Steckdose.
	Luftschläuche nicht korrekt eingesteckt	Stecken Sie die Luftschläuche erneut ein.
Während der Anwendung beginnt die Kontrollleuchte am Handschalter zu blinken und das Venen-Massagegerät schaltet sich aus	Batterien sind leer	Tauschen Sie die Batterien im Handschalter aus.

Falls Ihr Problem hier nicht aufgeführt wurde, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

10. ENTSORGUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich hierzu verpflichtet. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Sie können sich bei Ihrem Händler über Rückgabemöglichkeiten vor Ort informieren.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

11. TECHNISCHE DATEN

Manschettendruck	max. 160 mmHg
Manschettengröße	29-53 cm
Spannungsversorgung bei Batteriebetrieb	6,0 V DC (4 x 1,5V  AA Batterien (Alkaline Type LR06))
Zulässige Betriebsbedingungen	+5 °C bis +40 °C, 15–93 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend), 700 – 1060 hPa Umgebungsdruck.
Zulässige Aufbewahrungsbedingungen	-25 °C bis +70 °C, 0–93 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zulässige Transportbedingungen	-25 °C bis +70 °C, 0–93 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend).
Maße	Beinmanschette: 61 x 52 x 0,5 cm Handschalter: 16,5 x 7,5 x 3 cm Netzteil: 6,6 x 7,1 x 2,3 cm
Gewicht	ca. 1200 g (ohne Netzteil)
Schutzklasse	
Klassifikation	Typ BF 
Zu erwartende Lebensdauer des Geräts	Information zur Lebensdauer des Geräts finden Sie auf der Homepage

12. NETZTEIL

Spannungsversorgung bei Netzbetrieb	Eingang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ausgang: 6,0 V DC, 0,5 A; 3,0 W
Polarität	
Schutzklasse	

Hinweise zu Elektromagnetischer Verträglichkeit

- Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 60601-1-2 (Gruppe 1, Klasse A und B, in Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, 61000-4-2, IEC 6100-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11 , IEC 61000-4-8) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Genauere Angaben können Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern.
- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/ Gerätes auftreten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderen Bestandteilen, als jenem, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Gerätes führen.

13. GARANTIE / SERVICE

Die Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler (nachfolgend „HaDi“ genannt) gewährt unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Garantie für dieses Produkt.

Die Inanspruchnahme der Garantie lässt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer bei Mängeln unberührt. Der Käufer kann diese gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich in Anspruch nehmen. Die Garantie gilt außerdem unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften.

HaDi garantiert die mangelfreie Funktionstüchtigkeit und die Vollständigkeit dieses Produktes.

Die weltweite Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Beginn des Kaufes des neuen, ungebrauchten Produktes durch den Käufer.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen Gebrauchs verwendet. Es gilt deutsches Recht.

Falls sich dieses Produkt während der Garantiezeit als unvollständig oder in der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird HaDi gemäß diesen Garantiebedingungen eine kostenfreie Ersatzlieferung oder Reparatur durchführen.

Wenn der Käufer einen Garantiefall melden möchte, wendet er sich zunächst an den HaDi Kundenservice:

Service Hotline (kostenfrei): E-Mail-Adresse:

☎ Tel.: 0800 724 2355 service-de@sanitas-online.de

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur Abwicklung des Garantiefalles, z.B. wohin er das Produkt kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erforderlich sind.

Fordern wir den Käufer zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

NU Service GmbH
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in Betracht, wenn der Käufer

- eine Rechnungskopie/Kaufquittung und
- das Original-Produkt

HaDi oder einem autorisierten HaDi Partner vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind

- Verschleiß, der auf normalem Gebrauch oder Verbrauch des Produktes beruht;
- zu diesem Produkt mitgelieferte Zubehörteile, die sich bei sachgemäßen Gebrauch abnutzen bzw. verbraucht werden (z.B. Batterien, Akkus, Manschetten, Dichtungen, Elektroden, Leuchtmittel, Aufsätze, Inhalatorzubehör);
- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Bestimmungen der Bedienungsanleitung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von HaDi autorisierten Servicecenter geöffnet, repariert oder umgebaut wurden;
- Schäden, die auf dem Transportweg zwischen Hersteller und Kunde bzw. zwischen Servicecenter und Kunde entstehen
- Produkte, die als 2.Wahl-Artikel oder als gebrauchte Artikel gekauft wurden;
- Folgeschäden, welche auf einem Mangel dieses Produktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bestehen).

Reparaturen oder ein Komplettaustausch verlängern in keinem Fall die Garantiezeit

Für Anwender / Patienten in der Europäischen Union und identischen Regulierungssystemen (Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745) gilt: Sollte sich während oder aufgrund der Anwendung des Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie der jeweiligen nationalen Behörde des Mitgliedsstaates, in welchem sich der Anwender/Patient befindet.

